



## Filtre DEMICAP 0,2 micron

### PROTOCOLE D'UTILISATION

#### MISE EN PLACE DU FILTRE DEMICAP 0,2 $\mu$

- 1- Faire couler l'eau pendant une minute avant adaptation du filtre, afin de rincer le col de cygne.
- 2- Ouvrir le sachet contenant le filtre côté adaptateur et dégager l'adaptateur sans le toucher.
- 3- Tenir le filtre d'une main, toujours dans son sachet et de l'autre main, soulever la bague du raccord rapide. Introduire l'adaptateur dans le raccord rapide jusqu'à la butée, et relâcher la bague du raccord rapide.
- 4- Tirer légèrement sur le filtre pour vérifier sa bonne mise en place, sinon renouveler l'opération.
- 5- Conserver le sachet d'autoclavage sur le filtre jusqu'à utilisation.
- 6- juste avant utilisation, serrer l'évent bas, faire couler l'eau pour purger l'air, puis serrer l'évent haut.

#### ATTENTION:

Un filtre dont l'extrémité inférieure est entrée en contact avec un objet (main ou autre), n'est plus stérile.

Il convient de le remplacer immédiatement. Le filtre DEMICAP 0,2 $\mu$  doit être stérilisé à l'autoclave toutes les 24 heures, à 134°C pendant 18 minutes.

#### PRÉPARATION DU FILTRE POUR AUTOCLAVAGE

- 1- Tenir le filtre d'une main et de l'autre soulever la bague du coupleur du col de cygne. Retirer le filtre.
- 2- Ouvrir les deux événements (1 à 2 tours sans les ôter), et vider l'eau contenu dans le filtre en le retournant.
- 3- Cocher au feutre indélébile une case sur l'étiquette de stérilisation du filtre et sécher le filtre (extérieurement).
- 4- Laisser les deux événements ouverts et procéder à la mise en sachet.
- 5- Autoclaver le filtre à 134°C pendant 18 minutes (60 cycles)